

## Gebrauchsanweisung

### Rhinoclin® Baby & Kind Nasendusche



Die **Rhinoclin® Baby & Kind** Produkte schützen und pflegen die Schnupfennase Ihres Kindes von Geburt an. Sie können bedenkenlich, ohne Anwendungsbeschränkungen oder Gewöhnungseffekte ab dem 1. Lebenstag angewendet werden. Die **Rhinoclin® Baby & Kind** Produkte bestehen aus einer Nasendusche mit Ringerlösung zum Sprühen und aus einem Nasenbalsam mit Engelwurz.

#### » Was ist in **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche enthalten?

**Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche enthält eine sterile, isotonische Ringerlösung – eine Salzlösung, die Mineralstoffe wie Kalium und Calcium enthält. Auf Konservierungsstoffe und chemische Zusätze wurde selbstverständlich verzichtet.

Bestandteile:	
Natriumchlorid	0,86 g
Kaliumchlorid	0,03 g
Calciumchlorid	0,033 g
gereinigtes Wasser ad	100 ml

Zwischen 15 °C und 30 °C lagern.

#### » Wann wird **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche angewendet?

Die **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche wird zur Reinigung und sanften Spülung der Nasenhöhle von Säuglingen und Kindern z.B. zum Lösen von Krusten, Schleim und Borken, bei vermehrter Luftbelastung (z.B. Staub- und Schmutzbelastung) sowie als begleitende Maßnahme bei Schnupfen, allergischem Schnupfen und Heuschnupfen verwendet. Sie kann als vorbeugende oder begleitende Maßnahme bei verstopfter Nase angewendet werden. Erkältungsviren, Allergene sowie Krankheitserreger werden aus der Nase gespült! Sie eignet sich auch zum Anfeuchten der Nasenschleimhaut bei geringer Luftfeuchtigkeit, z.B. in geheizten oder klimatisierten Räumen, und befeuchtet die trockene oder gereizte Nasenschleimhaut. Bei vermehrter Pollen- und Hausstaubbelastung können Überempfindlichkeitsreaktionen reduziert werden. Auch die Anwendung von abschwellenden Medikamenten kann verringert werden. Da **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche eine sterile Lösung enthält, ist diese auch zur Anwendung vor und nach Nasenoperationen geeignet. Es sollte jedoch vor dieser Anwendung der Rat des behandelnden Arztes eingeholt werden. Der Sprühkopf wurde den Anforderungen von Säuglingen und Kindern angepasst. Eine sichtbare Verdickung verhindert das zu tiefe Eindringen in die Kindernase. Der Sprühnebel ist fein und daher besonders mild und effektiv in der Anwendung.

#### » Wann ist bei der Anwendung **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche Vorsicht geboten?

Der Nasenadapter darf bei der Anwendung nicht zu tief in die Nase des Kindes eingeführt werden, um Verletzungen in der Nasenhöhle zu vermeiden. Der speziell für Säuglinge und Kinder entwickelte Adapter hat eine Verdickung (markierte Position) am oberen Ende. Tiefer sollte der Adapter nicht in die Kindernase eingeführt werden.

#### » Wie verwenden Sie **Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche?

Dosierung: Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen.

Ab dem 1. Lebenstag/von Geburt an anwendbar: Bringen Sie Ihr Kind in eine sichere Lage. Den Kopf des Kindes auf eine Seite drehen, behutsam den Sprühkopf in das obere Nasenloch einführen und den Sprühkopf kurz betätigen. Den Kopf nun auf die andere Seite drehen und den Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen. Säubern Sie die Nase des Kindes mit einem weichen Tuch. Reinigen Sie den Sprühkopf mit Seifenwasser, anschließend mit klarem Wasser und trocknen Sie ihn.

Kinder ab 6 Monate: Die Sprühdose kann in jeder Lage verwendet werden. Behutsam in jedes Nasenloch einführen und kurz (1-2 Sekunden) den Sprühkopf drücken. Dank des speziellen Sprühsystems ist die Anwendung in jeder Lage sowie Position möglich.

#### » Was ist ferner zu beachten?

##### Achtung

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

##### Vorsichtsmaßnahmen

- Zur Vermeidung von Infektionen sollte die Nasenspülung nur von einer Person verwendet werden.
- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Sprühkopf mit Seifenwasser und anschließend mit warmem Wasser.
- Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten sollte nur bei gewichtigen Gründen erfolgen und Kinder beaufsichtigt werden.
- Niemals den Kopf des Kindes nach hinten legen, damit die Lösung nicht in den Rachen läuft.

 Gebrauchsanweisung beachten.

#### » Welche Packungen sind erhältlich?

**Rhinoclin® Baby & Kind** Nasendusche: Packung zu 100 ml Lösung im Dauersprühsystem.

In jeder Apotheke erhältlich.

Ab dem 1. Lebenstag!  
Frei von Gewöhnungseffekten &  
Konservierungsstoffen



Weitere Informationen  
unter [www.rhinoclr.de](http://www.rhinoclr.de)

## » Nasenbalsam mit Engelwurz zur wohltuenden Pflege

Der Bereich der Nasenlöcher wird bei Kindern und Säuglingen bei Schnupfen besonders beansprucht. Er kann austrocknen oder sich entzünden. Um diesen Bereich zu schützen und zu pflegen empfiehlt sich ein spezieller Nasenbalsam. Der **Rhinoclr® Baby & Kind** Nasenbalsam mit Engelwurz schützt und pflegt die empfindliche Haut im Bereich der Nasenlöcher Ihres Kindes auf natürliche Weise. Unangenehmer Krusten- und Borkenbildung im Bereich der Nasenlöcher wird vorgebeugt und die Nasenatmung erleichtert. Engelwurz, Thymian und Majoran sorgen zusätzlich für wohltuenden Duft. Auf Minz- oder Eukalyptusaromen wurde bewusst verzichtet. Der **Rhinoclr® Baby & Kind** Nasenbalsam mit Engelwurz ist frei von Nebenwirkungen, Gewöhnungseffekten und Konservierungsstoffen. Er kann ab dem 1. Lebensstag unbedenklich angewendet werden.

**Rhinoclr® Baby & Kind** Nasenbalsam ist in einer Tube mit 10 g Balsam in jeder Apotheke exklusiv erhältlich.



VER: 2018-02-02

Vertrieb Deutschland:  
Febena Pharma GmbH, Domstraße 79 A, 50668 Köln. Tel.: 0221-9544770, [info@febena.de](mailto:info@febena.de)

Stand der Information: Februar 2018

Medizinprodukt REF 1010-6



CE 0413



Aurena Laboratories AB  
Fjärrviksvägen 22, SE-653 50  
Karlstad, Sweden

LOT siehe Dosenboden / Packungsboden

FEBENA PHARMA